

TAMPONĖLIS SU TRANSPORTINE TERPE IR BE JOS

Vienkartinis produktas. Etileno oksidu arba spinduliuote sterilizuoti tamponėliai (nurodyta ant pakuotės).

Transportavimo terpė yra in vitro diagnostikos (IVD) medicinos priemonė, o tamponėliai su terpėmis arba be jų yra medicinos priemonė (MD) sertifikuoti pagal CE0318. Koteliai pagaminti iš medžio, plastiko, pinto aliuminio arba standaus aliuminio, o galvutės – iš medvilnės, standartinio poliesterio arba viskozės.

Numatytas tikslas:

A šallitės skzskzlll l kszsllt tamponok steril invaziv termek, amelyek a beteggel kszvetlenul lrintkezve, sebészeti jellegűek, szallitoteskzskzlll vagy anélkül, a későbbi mikrobiológiai elemzéshez, speciális egészségügyi személyzet által és megfelelő higiénés körülmények között minták gyűjtésére szolgálnak. A tampont klinikai-kórházi környezetben való használatra szánják.

Pristatymas:

- Sterilus tamponėliai supakuoti į nuplėšiamą popierinę-plastikinę ar plastikinio maišelio pakuotę, arba tuščią tūbelę.
- Tamponėliai su transportine terpe, yra atskirai supakuoti į nuplėšiamą popierinę-plastikinę pakuotę, kurioje yra tamponėlis tūbelėje su transportine terpe.

Figyelmeztetések:

1. Ha az egység csomagolása eltörik, ne használja a tampont, mivel nem garantálja a sterilitást.
2. Ne használja, ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy ha a nyomtatott termékinformáció nem megfelelően jelenik meg.
3. Dobja ki a terméket, ha piskos, törött és/vagy szilánkos kefék talál, és/vagy nem tömörített fejfel és/vagy anélkül.
4. Ne használja, ha a lejárati idő túlépte.
5. Ne használja, ha a szállítóeszközön változást észlel.
6. Semmilyen körülmények között ne nyelje le a szállítóeszközt.
7. Csak egyszeri használatra. A termék újrafelhasználása fertőzést okozhat.
8. Óvatosan kezelje. Bár nem valószínű, a használat közbeni túl nagy nyomás eltörheti az ecsetet. Ha törött, azonnal dobja ki.

9. A szállítóeszköz nélküli kefék nem igényelnek különleges tárolási feltételeket. A szállítóeszközrel ellátott tamponokat száraz helyen, napfénytől védett helyen, 2-30°C közötti hőmérsékleten célszerű tárolni.

Bendrosios atsargumo priemonės:

1. Netinka jokiam kitam naudojimui, išskyrus numatytą paskirtį.
2. Vaikams rekomenduojama naudoti tamponėlį su plastikiniu arba aliuminiu koteliu.
3. Numatytiems naudotojams tamponėlio naudojimas nesukelia sunkumų.
4. Tamponėliams su transportine terpe, naudojimo instrukcija su grafika yra atspausdinta ant pirminės nuplėšiamos pakuotės.
5. Panaudoti tamponėliai turi būti nukensminti arba tvarkomi kaip užterštos ligoninių atliekos. Kiekviena laboratorija yra atsakinga už atliekų tvarkymą, apdorojimą ir šalinimą pagal taisykles. Nepanaudoti tamponėliai gali būti laikomi nepavojingais produktais ir gali būti šalinami atitinkamai.

Bibliografija:

1. Cuñé J. ir kt. Paviršinė tepinėlių kultūra yra naudinga mikrobiologinei diagnozei ūmių protezuotų sąnarių infekcijų metu. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009 m.
2. Gil P ir kt. Laboratorinės diagnostikos ir mėginių ėmimo svarba diagnozuojant ir gydant mikožę pediatrijoje. El Peu, 29(4): 216-221. 2009 m.
3. Garcia JM ir kt. Mėginių surinkimas, transportavimas ir bendras apdorojimas Mikrobiologijos laboratorijoje. Klinikinės mikrobiologijos procedūros. Ispanijos infekcinių ligų ir klinikinės mikrobiologijos draugija (SEIMC). 2017 m.

Sausi tamponėliai:	Tamponėliai su terpe:
- Medvilninis su aliuminio koteliu - Medvilninis su mediniu koteliu - Medvilninis su polistireniniu koteliu - Poliesterio su polistireniniu koteliu - Viskozinis su aliuminio koteliu - Viskozinis su pinto aliuminio koteliu - Viskozinis su mediniu koteliu - Viskozinis su polistireniniu koteliu	- Medvilninis su aliuminio koteliu ir Stuart - Medvilninis su aliuminio koteliu ir Virus - Medvilninis su mediniu koteliu ir Cary Blair - Medvilninis su mediniu koteliu ir Stuart - Poliesterio su aliuminio koteliu ir Virus - Poliesterio su polistireniniu koteliu ir Chlamidijoms - Poliesterio su polistireniniu koteliu ir Virus - Viskozinis su aliuminio koteliu ir Amies - Viskozinis su aliuminio koteliu ir Amies su anglim - Viskozinis su pinto aliuminio koteliu ir Amies - Viskozinis su pinto aliuminio koteliu ir Amies su anglimi - Viskozinis su pinto aliuminio koteliu ir Stuart - Viskozinis su polistireniniu koteliu ir Amies - Viskozinis su polistireniniu koteliu ir Amies su anglimi - Viskozinis su polistireniniu koteliu ir Cary Blair - Viskozinis su polistireniniu koteliu ir Stuart

Simbolių žodynas:

 Katalogo numeris	 Partijos numeris	 Naudojimo instrukcijos rasite svetainėje www.deltalab.es/eifus	 Kiekis	 Sterilus iki švitinimas
 In vitro diagnostikai	 Medicininis prietaisas	 Nenaudokite, jei pakuotė pažeista	 nenaudoti	 Sterilus iki etileno oksidas
 Saugoti nuo saulės spindulių	 Gamintojas	 Tinkamumo laikas	 CE ženklavimas	 Sandėliavimo temperatūros
 Ierices unikalais identifikators	 Pagaminimo data	 Unikali sterili barjerų sistema		

Ivykus rimtam incidentui*, susijusiam su gaminiu, praneškite „Deltalab“, SL ir valstybės, kurioje yra įsisteigęs vartotojas, kompetentingai institucijai. * „Rimtu incidentu“ laikomas toks incidentas, dėl kurio miršta arba smarkiai pablogėja paciento ar naudotojo sveikata arba kyla rimta grėsmė visuomenės sveikatai.

Tamponėlis rinkimui: 
Tūbelė su terpe: 

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es