

NO

STERILE VATTPINNER MED OG UTEN TRANSPORTMIDDEL

Til engangsbruk. Vattpinner sterilisert med etylenoksid eller ved stråling (angitt på pakken).

Transportmedier er medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD), mens vattpinner, med eller uten media, er medisinsk utstyr (MDD) sertifisert av CE0318. Håndtaket er laget av tre, plast, flettet aluminium eller rigid aluminium, og tuppen er laget av bomull, standar, polyester eller viskose.

Tiltenkt formål:

Vatter med og uten transportmidler er sterile invasive produkter for innsamling av prøver ved direkte kontakt med pasienten, av kirurgisk type, med og uten transportmidler for påfølgende mikrobiologisk analyse, av spesialisert helsepersonell og under hensiktsmessige hygieniske forhold. . Pinnen er beregnet på bruk i kliniske sykehusmiljøer.

Presentasjon:

- Sterile vattpinner gruppepakket i «peel-pack», «flow-pack» poser eller i tuber.
- Vattepinner med transportmedium, er gruppepakket i en avtrekkbar peelpack, som inneholder en vattpinne pluss et rør med transportmediet.

Advarsler:

1. Hvis enhetens emballasje går i stykker, må du ikke bruke vattpinnen da den ikke har noen garanti for sterilitet.
2. Ikke bruk hvis noen komponent mangler eller hvis den trykte produktinformasjonen ikke vises riktig.
3. Kast produktet hvis du finner skitne, ødelagte og/eller splittede børster og/eller med hodet ikke komprimert og/eller uten.
4. Må ikke brukes hvis utløpsdatoen er overskredet.
5. Må ikke brukes hvis det observeres endringer i transportmidlet.
6. Ikke svelg transportmidlet under noen omstendigheter.
7. Kun til engangsbruk. Gjenbruk av dette produktet kan forårsake infeksjoner.
8. Håndteres med forsiktighet. Selv om det er usannsynlig, kan for mye trykk under bruk knekke børsten. Kast umiddelbart hvis den er ødelagt.

9. Børster uten transportmiddel krever ingen spesielle oppbevaringsforhold. For vattpinner med transportmidler anbefales det å oppbevare dem på et tørt sted, beskyttet mot sollys og ved en temperatur mellom 2-30°C.

Generelle forholdsregler:

1. Ikke egnet for andre bruksområder enn tiltenkt bruk.
2. For pediatrik bruk anbefales børsten med plast- eller aluminiumstøtte.
3. Bruken av kosten byr ikke på noen vanskeligheter for de tiltenkte brukerne.
4. For vattpinner med transportmedium er bruksanvisning med grafikk inkludert i primærpakningen (peel-pack).
5. Når de er brukt, bør vattpinner dekontamineres eller behandles som kontaminert sykehusavfall. Det er hvert laboratoriums ansvar å håndtere, behandle og deponere avfall i henhold til forskrifter. Ubrukte børster kan betraktes som ufarlige produkter og kan kasseres i henhold til disse kriteriene.

Bibliografi:

1. Cuñé J. et al. En overfladisk vattpinnekultur er nyttig for mikrobiologisk diagnose ved akutte protetiske leddinfeksjoner. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Betydningen av laboratoriediagnose og prøvetaking for diagnostisering og behandling av mykose i fotterapi. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Innsamling, transport og generell behandling av prøver i Mikrobiologilaboratoriet. Prosedyrer i klinisk mikrobiologi. Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC). 2017.

Ref	Descripción	Description
300200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	ESCOBILLON PS+ALGODON PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/1	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSA
300203	ESCOBILLON ALU+ALGODON PEEL	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	ESCOBILLON MAD.+ALGOD.B/2 PEEL	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	ESCOBILLON ALU.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA
300253	ESCOBILLON ALU.+VISCOSA TUBO	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSA
300261	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	ESCOBILLÓN 13X165MM PS C/POLIÉSTER	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
300212.1	ESCOBILLON PS+VISCOSA PEEL/2	SWAB PEEL/2 PS+VISCOSA
310200	ESCOBILLON MAD.+ALGODON FLOW	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	ESCOBILLON PS+VISCOSA FLOW	PS+VISCOSA SWAB FLOW
300250.M	ESCOBILLON MAD.+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON

Ref	Descripción	Description
300252W	ESCOBILLON PS+VISCOSA TUBO T/BLANCO	SWAB IN TUBE PS+VISCOSA WHITE CAP
300261.M	ESCOBILLON PS+ALGODON TUBO	SWAB IN TUBE PS+COTTON
300280	CARY BLAIR MADERA+ALGODON	CARY BLAIR SWAB WOOD+COTTON
300281	AMIES ALUMINIO+VISCOSA	AMIES SWAB ALUMINIUM+VISCOSA
300285	AMIES CARBON PS+VISCOSA	AMIES+CHARCOAL SWAB PS+VISCOSA
300287	AMIES PS+VISCOSA	AMIES SWAB PS+VISCOSA
300290	STUART MADERA+ALGODÓN	STUART SWAB WOOD+COTTON
300291	STUART ALUMINIO+ALGODÓN	STUART SWAB ALUM+COTTON
300295	STUART 13X165MM PS C/VISCOSA	STUART 13X165MM PS W/VISCOSA
300298	VIRUS 2ML PS+VISCOSA	VIRUS 2ML SWAB PS+VISCOSA
300280.2	CARY BLAIR PS+VISCOSA	CARY BLAIR SWAB PS+VISCOSA
300281/1	ESC. AMIES+CARBON ALUM.VISCOSA	AMIES CHARCOAL SWAB WIRE+VISCOSA
300284.SE	AMIES LIQUIDO PS+VISCOSA S/ESPONJA	AMIES SWAB LIQUID PS+VISCOSA NO SPONGE
300299.SE	CHLAMYDIA PS+POLIESTER S/ESPONJA	CHLAMYDIA SWAB PS+POLYESTER NO SPONGE

Ordliste med symboler:

 Katalognummer	 Lottnummer	 Se bruksanvisningen på nettstedet www.deltalab.es/eifus	 Mengde	 Steril til bestråling
 Medisinsk utstyr for in vitro diagnostikk	 Medisinsk enhet	 Ikke bruk hvis emballasjen er skadet	 Ikke gjenbruk	 Ruststeril av etylen
 Hold deg unna sollys	 Maker	 Dato av utløp	 CE-merking	 temperaturtil fra Oppbevaring
 Unik enhetsidentifikator	 Produksjonsdato	 Unik steril barrieriesystem		

I tilfelle en alvorlig hendelse* relatert til produktet, varsle både Deltalab, SL og den kompetente myndigheten i staten der brukeren er etablert. *En "alvorlig hendelse" forstås å være en hendelse som fører til død eller alvorlig forverring av helsen til pasienten eller brukeren eller en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Børste for samling:  0318 

Rør med medium:  

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es