

STERIILIT NÄYTTEENOTTOTIKUT

Kertakäyttöinen tuote. Etyleenioksidilla tai säteilyllä steriloidut kuljetusputket ja näytteenottotikut (merkitty pakkaukseen).

Näytteenottotikut ovat lääkinällisiä laitteita (MDD) ja ne ovat CE0318 merkittyjä.

Näytteenottotikun varsi on valmistettu puusta, muovista, punotusta tai jäykästä alumiinista ja näytteenottotikun pää on valmistettu puuvillasta, polyesteristä tai viskoosista.

Käyttötarkoitus:

Vanupuikkoja niitä ovat steriilejä invasiivisia tuotteita, jotka on tarkoitettu näytteiden keräämiseen suorassa kosketuksessa potilaan kanssa, kirurgista tyyppiä, myöhempiä mikrobiologista analyysiä varten, erikoistunut terveydenhuoltohenkilöstö ja asianmukaisissa hygieniasuhteissa. Vanupuikko on tarkoitettu käytettäväksi kliinis-sairaalaympäristöissä.

Pakkaustapa:

- Steriilit näytteenottotikut ovat yksittäispakattuja repäisy- tai kuorittavaan pakkaukseen tai putkeen.

Varoitukset:

1. Jos yksikköpakkaus rikkoutuu, älä käytä vanupuikkoa, sillä sen steriiliyttä ei voida taata.
2. Älä käytä, jos jokin osa puuttuu tai jos tulostetut tuotetiedot eivät näy oikein.
3. Hävitä tuote, jos löydät likaisia, rikkinäisiä ja/tai halkeilevia harjoja ja/tai joiden pää ei ole tiivistynyt ja/tai ilman sitä.
4. Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivä on ylittetty.
5. Vain kertakäyttöön. Tämän tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektioita.
6. Käsittele varovasti. Vaikka se on epätodennäköistä, liiallinen paineen käyttäminen käytön aikana voi rikkoa harjan. Jos rikki, hävitä välittömästi.
7. Harjat ilman kuljetusvälinettä eivät vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Yleiset varotoimet/varotoimenpiteet/turvatoimenpiteet:

1. Ei sovellu mihinkään muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen
2. Lasten näytteenottoon suositellaan muovi- tai alumiinivarrella varustettua näytteenottotikkaa.
3. Näytteenottotikun käyttö ei aiheuta vaikeuksia sen käyttäjille.
4. Käytön jälkeen näytteenottotikut tulee hävittää ja käsitellä kontaminoituneena sairaalajätteenä. Jokaisen laboratorion vastuulla on käsitellä ja hävittää jätteet määrysten mukaisesti. Käyttämättömiä näytteenottotikkuja ja kuljetusputkia voidaan pitää vaarattomina tuotteina ja ne voidaan hävittää näiden kriteerien mukaisesti.

Bibliografia:

1. Cuñé J. et al. Pinnallinen vanupuikkovillelmä on hyödyllinen akuuttien proteettisten nivelinfektioiden mikrobiologisessa diagnosoinnissa. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009.
2. Gil P, et al. Laboratoriodiagnoosin ja näytteenoton merkitys mykoosin diagnosoinnissa ja hoidossa jalkaterapiassa. El Peu, 29(4): 216-221. 2009
3. Garcia JM, et al. Näytteiden keräys, kuljetus ja yleinen käsittely mikrobiologian laboratoriossa. Kliinisen mikrobiologian menetelmät. Espanjan tartuntatauti- ja kliinisen mikrobiologian yhdistys (SEIMC). 2017

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Symbolien sanasto:

 Luettelonumero	 Eräkoodi	 Tutustu verkkosivuston käyttöohjeisiin www.deltalabgroup.com/eifus	 Määrä	 Steriloitu säteilyttämällä
 Yksittäinen steriili estojärjestelmä	 Valmistaja	 Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut	 älä käytä uudelleen Kertakäyttöinen	 Steriloitu etyleenioksidilla
 Säilytettävä auringonvalolta suojattuna	 Valmistuspäivä	 Käytettävä viimeistään	 CE-merkintä	 Lääketieteellinen laite
 yksilöllisellä laitetunnisteella				

Jos tuotteeseen liittyy vakava vaaratilanne*, ilmoita asiasta sekä Deltalabille, SL:lle että sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä on sijoittautunut. **"Vakavalla tapahtumalla" tarkoitetaan tilannetta, joka johtaa potilaan tai käyttäjän kuolemaan tai vakavaan terveydentilan heikkenemiseen tai vakavaan kansanterveyteen kohdistuvaan uhkaan.

 DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es