

STERILŪS TAMPONAI

Vienkartinis produktas. Etileno oksidu arba spinduliuote sterilizuoti tamponėliai (nurodyta ant pakuotės).

Tamponėliai medicinos (MD) sertifikuoti pagal CE0318.

Koteliai pagaminti iš medžio, plastiko, pinto aliuminio arba standaus aliuminio, o galvutės – iš medvilnės, standartinio poliesterio arba viskozės.

Numatytas tikslas:

Tamponok steril invaziv termėkek, amelyek a beteggel kōvzetlenūl ērintkeze, sebēszeti jellegūek, a kēsōbbi mikrobiolōgiai elemzēshez, speciālis egēszsēgūgyi szemēlyzet āltal ēs megfelelō higiēnēs kōrūlmēnyek kōzōtt mintāk gyūjtēsēre szolgālnek. A tampont klinikai-kōrhāzi kōrnyezetben valō hasznālatra szānjāk.

Pristatymas:

- Sterilūs tamponėliai supakuoti į nuplėšiamą popierinę-plastikinę ar plastikinio maišelio pakuotę, arba tuščią tūbelę.

Figyelmeztetések:

1. Ha az egység csomagolása eltörik, ne használja a tampont, mivel nem garantálja a sterilitást.
2. Ne használja, ha valamelyik alkatrész hiányzik, vagy ha a nyomtatott termékinformáció nem megfelelően jelenik meg.
3. Dobja ki a terméket, ha piskos, törött és/vagy szilánkos kefék talál, és/vagy nem tömörített fejfel és/vagy anélkül.
4. Ne használja, ha a lejárati idő túllépte.
5. Csak egyszeri használatra. A termék újrafelhasználása fertőzést okozhat.
6. Óvatosan kezelje. Bár nem valószínű, a használat közbeni túl nagy nyomás eltörheti az ecsetet. Ha törött, azonnal dobja ki.
7. A szállítóeszköz nélküli kefék nem igényelnek különleges tárolási feltételeket.

Bendrosios atsargumo priemonės:

1. Netinka jokiam kitam naudojimui, išskyrus numatytą paskirtį.
2. Vaikams rekomenduojama naudoti tamponėlį su plastikiniu arba aliuminiu koteliu.
3. Numatytiems naudotojams tamponėlio naudojimas nesukelia sunkumų.
4. Panaudoti tamponėliai turi būti nukenksminti arba tvarkomi kaip užterštos ligoninių atliekos. Kiekviena laboratorija yra atsakinga už atliekų tvarkymą, apdorojimą ir šalinimą pagal taisykles. Nepanaudoti tamponėliai gali būti laikomi nepavojingais produktais ir gali būti šalinami atitinkamai.

Bibliografija:

1. Cuñé J. ir kt. Paviršinė tepinėlių kultūra yra naudinga mikrobiologinei diagnozei ūmių protezuotų sąnarių infekcijų metu. Clin Orthop Relat Res, 467: 531-535. 2009 m.
2. Gil P ir kt. Laboratorinės diagnostikos ir mėginių ėmimo svarba diagnozuojant ir gydant mikozę pediatrijoje. El Peu, 29(4): 216-221. 2009 m.
3. Garcia JM ir kt. Mėginių surinkimas, transportavimas ir bendras apdorojimas Mikrobiologijos laboratorijoje. Klinikinės mikrobiologijos procedūros. Ispanijos infekcinių ligų ir klinikinės mikrobiologijos draugija (SEIMC). 2017 m.

Ref	Description
300200	SWAB I/W PEEL/1 WOOD+COTTON
300201	SWAB I/W PEEL/1 PS+COTTON
300202	SWAB I/W PEEL/1 PS+VISCOSE
300203	SWAB I/W PEEL ALUM+COTTON
300210	SWAB B/2 PEEL/2 WOOD+COTTON
300250	SWAB IN TUBE WOOD+COTTON
300251	SWAB IN TUBE ALUM+COTTON
300252	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE
300253	SWAB IN TUBE ALUM+VISCOSE
300261	SWAB IN TUBE PP+COTTON
300263	SWAB 13X165MM PS W/POLYESTER
310200	WOOD+COTTON SWAB FLOW
310202	PS+VISCOSE SWAB FLOW
300252W	SWAB IN TUBE PS+VISCOSE WHITE CAP

Simbolių žodynas:

 Katalogo numeris	 Partijos numeris	 Naudojimo instrukcijas rasite svetainėje www.deltalabgroup.com/eifus	 Kiekis	 Sterilus iki švitinimas
 Unikali sterilii barjerų sistema	 Gamintojas	 Nenaudokite, jei pakuotė pažeista	 nenaudoti	 Sterilus iki etileno oksidas
 Saugoti nuo saulės spindulių	 Pagaminimo data	 Tinkamumo laikas	 CE ženklimas	 Medicininis prietaisas
 Ierices unikālais identifikators				

Įvykus rimtam incidentui*, susijusiam su gaminiu, praneškite „Deltalab“, SL ir valstybės, kurioje yra įsisteigęs vartotojas, kompetentingai institucijai. * „Rimtu incidentu“ laikomas toks incidentas, dėl kurio miršta arba smarkiai pablogėja paciento ar naudotojo sveikata arba kyla rimta grėsmė visuomenės sveikatai.



DELTALAB, S.L.
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.
info@deltalabgroup.com - www.deltalab.es

