

NYLONOVÝ FLOKOVANÝ TAMPÓN

Určené použitie:

Sterilný invazívny systém chirurgického typu na odber vzoriek priamym kontaktom s pacientom.

Určený na jednorazové použitie. Spôsob sterilizácie je uvedený na primárnom obale. Tampóny sú zdravotnícke pomôcky (MD) a spadajú pod CE0318.

Prezentácia:

Tampón sa skladá z polystyrénovej tyčinky a flokovanej nylonovej hlavice. Majú rôzne tvary a veľkosti v závislosti od miesta odberu vzorky: štandardný flokovaný tampón, uretrálny flokovaný tampón, nazofaryngeálny flokovaný tampón a flokovaný tampón typu minitip. Produkt určený na odber a transport biologických vzoriek na mikrobiologickú analýzu odbornými zdravotníckymi pracovníkmi a za vhodných hygienických podmienok.

Flokované tampóny sú jednotlivo balené v skúmavke, obale peel-pack alebo obale flowpack.

Tampón je určený na použitie v dvoch fázach:

- 1) odber vzorky zdravotníckym pracovníkom v klinicko-nemocničnom prostredí a jej preprava.
- 2) spracovanie vzorky špecializovaným zdravotníckym personálom v klinicko-nemocničnom prostredí. Používanie tampónu nepredstavuje pre určených používateľov žiadne ťažkosti.

Opatrenia:

Nevhodné na akékoľvek iné použitie, než je určené. Nepoužívajte, ak obal vykazuje akékoľvek známky porušenia alebo poškodenia. Ak zistíte, že jednotlivé balenie stratilo svoju celistvosť, tampón nepoužívajte, pretože jeho sterilita nie je zaručená. Nepoužívajte, ak si všimnete, že tampón je znečistený. Produkt zlikvidujte, ak zistíte, že má akékoľvek zlomené kefy, ostré hrany alebo chýbajúcu hlavicu. Len na jednorazové použitie, opätovné použitie tohto produktu môže spôsobiť infekcie. Zaobchádzajte opatrne. Akýkoľvek silný tlak počas používania môže, hoci je to nepravdepodobné, tampón zlomiť. V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite zlikvidujte. Tampóny nevyžadujú žiadne špeciálne podmienky skladovania. Po použití sa musia tampóny dekontaminovať alebo zlikvidovať ako kontaminovaný zdravotnícky odpad. Zaobchádzanie s odpadom, jeho spracovanie a likvidácia v súlade s platnou legislatívou je zodpovednosťou každého laboratória. Nepoužitý tampón možno považovať za neškodné produkty a podľa toho ich aj zlikvidovať. Nepoužívajte po uplynutí doby expirácie. Nepoužívajte, ak chýba akákoľvek súčasť alebo ak vytlačené údaje o produkte nie sú zobrazené správne.

Slovník symbolov:

 Katalógové číslo	 Číslo šarže	 Pokyny na použitie nájdete na webovej stránke www.deltalabgroup.com/eifus	 Množstvo	 Sterilizované ožiarením
 Uchovávať v suchu	 Zdravotnícka pomôcka	 Nepoužívajte, ak je obal poškodený	 Nepoužívajte opakovane	 Sterilizované etylénoxidom
 Uchovávať mimo slnečného žiarenia	 Výrobca	 Dátum použiteľnosti	 Označenie CE	
 Jedinečný identifikátor pomôcky	 Dátum výroby	 Jedinečný sterilný bariérový systém		

V prípade závažného incidentu* súvisiaceho s produktom informujte spoločnosť Deltalab, S.L. a príslušný orgán štátu, v ktorom má používateľ sídlo. *„Závažným incidentom“ sa rozumie taký incident, ktorý vedie k úmrtiu alebo k vážnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta či používateľa, prípadne predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie.



DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
 08191 Rubí, Barcelona. España/Španielsko.
info@deltalabgroup.com – www.deltalabgroup.com

Reference	Description
300262	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.80MM
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW