

SR

ŠTAPIĆ ZA UZIMANJE BRISA SA NAJLONSKIM VLAKNIMA

Namena:

Sterilan invazivni sistem za uzimanje uzoraka hirurškog tipa direktnim kontaktom sa pacijentom.

Namenjen za jednokratnu upotrebu. Metod sterilizacije je naznačen na primarnom pakovanju. Štapići za uzimanje brisa su medicinska sredstva (MD) i obuhvaćeni su sertifikacijom CE0318.

Prezentacija:

Štapić za uzimanje brisa sastoji se od polistirenske drške i vrha obloženog najlonskim vlaknima. Dostupan je u različitim oblicima i veličinama u zavisnosti od mesta uzimanja uzorka: standardni štapić za bris sa najlonskim vlaknima, štapić sa najlonskim vlaknima za uretralni bris, štapić sa najlonskim vlaknima za nazofaringealni bris i štapić sa najlonskim vlaknima sa mini vrhom. Proizvod je namenjen za uzimanje i transport bioloških uzoraka za mikrobiološku analizu od strane zdravstvenih radnika, u odgovarajućim higijenskim uslovima.

Štapići za uzimanje brisa sa najlonskim vlaknima pakuju se pojedinačno u epruvetu, u sterilno pakovanje sa odlepljujućom folijom ili u zavarenu kesicu.

Štapić je namenjen za upotrebu u dve faze:

- 1) uzimanje uzorka od strane zdravstvenog radnika u kliničko-bolničkom okruženju i njegov transport.
- 2) obrada uzorka od strane specijalizovanog zdravstvenog osoblja u kliničko-bolničkim uslovima. Upotreba štapića ne predstavlja poteškoće za predviđene korisnike.

Mere opreza:

Nije pogodan za bilo koju drugu primenu osim namenjene. Nemojte koristiti ako pakovanje pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako uočite da je jedinično pakovanje izgubilo svoju celovitost, nemojte koristiti štapić, jer ne postoji garancija njegove sterilnosti. Nemojte koristiti ako primetite da je štapić prljav. Bacite proizvod ako uočite bilo kakve oštećene četkice, ivice ili ako nedostaje vrh. Samo za jednokratnu upotrebu; ponovna upotreba ovog proizvoda može izazvati infekcije. Pažljivo rukujte proizvodom. Bilo kakav jak pritisak tokom upotrebe, iako je mala verovatnoća, može da polomi štapić. U slučaju bilo kakvog oštećenja, odmah ga bacite. Štapići ne zahtevaju nikakve posebne uslove skladištenja. Nakon upotrebe, štapići se moraju dekontaminirati ili tretirati kao kontaminirani medicinski otpad. Odgovornost je svake laboratorije da rukuje otpadom, da ga obrađuje i odlaže u skladu sa važećim zakonskim propisima. Neiskorišćeni štapići mogu se smatrati neškodljivim proizvodima i shodno tome mogu se odlagati. Nemojte koristiti ako je rok upotrebe prekoračen. Nemojte koristiti ako bilo koja komponenta nedostaje ili ako odštampane informacije o proizvodu nisu pravilno prikazane.

Rečnik simbola:

 Kataloški broj	 Broj serije	 Pogledajte uputstva za upotrebu na internet stranici www.deltalabgroup.com/eifus	 Količina	 Sterilisano zračenjem
 Čuvati na suvom mestu	 Medicinsko sredstvo	 Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno	 Nemojte koristiti ponovo	 Sterilisano etilen-oksikom
 Držati dalje od sunčeve svetlosti	 Proizvođač	 Upotrebiti do	 CE oznaka	
 Jedinstveni identifikator sredstva	 Datum proizvodnje	 Jedinstveni sistem sterilne barijere		

U slučaju ozbiljnog incidenta* u vezi sa ovim proizvodom, obavestite firmu Deltalab, S.L, kao i nadležni organ države u kojoj je korisnik registrovan. *„Ozbiljnim incidentom“ smatra se onaj koji podrazumeva smrt ili ozbiljno pogoršanje zdravlja pacijenta ili korisnika ili ozbiljnu pretnju po javno zdravlje.



DELTALAB, S.L.
 Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,
 08191 Rubí, Barcelona. Španija.
info@deltalabgroup.com - www.deltalabgroup.com

 

Reference	Description
300262	SWAB IN TUBE PS FLOCK NASOPH.80MM
300264	SWAB IN TUBE PS FLOCK STANDARD 100MM
310206K	FLOCKED SWAB STANDARD 80MM FLOW
310207K	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW