

**ESCOBILLON FLOCADO DE NYLON CON SOPORTE DE ABS ROMPIBLE****Finalidad prevista:**

Producto estéril invasivo por orificio natural para la recogida y transporte de muestras biológicas para su posterior análisis microbiológico por parte de personal sanitario especializado y en las condiciones higiénicas apropiadas. Los escobillones son productos sanitarios (MD) y están amparados por el CE0318. Producto de un solo uso. El método de esterilización se indica en el envase primario.

**Presentación:**

El escobillón está compuesto por un soporte rompible de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y una cabeza de nylon flocado con una forma adecuada para la toma de muestras nasofaríngeas. Los escobillones pueden presentarse envasados individualmente dentro de un tubo o de un envase peel-pack o flow-pack. El escobillon esta destinado a ser usado en entorno hospitalarios.

**Precauciones:**

El uso del escobillon no presenta ninguna dificultad para los usuarios previstos.

No apto para cualquier otra aplicación que no sea su uso previsto. No debe usarse si hay signos de rotura o deterioro del envase. Si se observa que el envase unitario ha perdido su integridad, no utilizar el escobillon ya que no se tiene garantía de esterilidad. No debe usarse si se observa suciedad en el escobillon. Desechar el escobillon si se encuentra roto o sin cabeza. La reutilización del producto puede provocar infecciones. Manipular con cuidado. Aunque es poco probable, ejercer una presión demasiado fuerte podría romper el escobillon. En caso de rotura, desechar inmediatamente. Los escobillones no precisan condiciones especiales de mantenimiento. Los escobillones, una vez utilizados, se deben descontaminar o tratar como residuos hospitalarios contaminados. Es responsabilidad de cada laboratorio manipular, tratar y eliminar los residuos según la legislación vigente. Los escobillones no utilizados pueden considerarse productos no peligrosos y pueden eliminarse según este criterio. No usar si se ha sobrepasado la fecha de caducidad. No usar en caso de falta de algún componente o si la información impresa del producto no se visualiza correctamente.

| REF.   | DESCRIPCIÓN                  |
|--------|------------------------------|
| 310217 | ESCOB.FLOCK NASOF. 80MM FLOW |

**Glosario de símbolos:**

|                                                                                                                               |                                    |                                                                                                       |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>REF</b>                                | Número de catálogo                 |  <b>LOT</b>        | Número de lote     |  <b>Fecha de caducidad</b>                   |  <b>STERILE R</b>                                                                                                                         | Estéril por irradiación                                                                                           |  <b>Sistema de barrera estéril único</b> |
|  <b>UDI</b>                                | Identificador único de dispositivo |  <b>MD</b>         | Producto Sanitario |  <b>No utilizar si el envase está dañado</b> |  <b>No reutilizar</b>                                                                                                                    |  <b>Fecha de fabricación</b> |                                                                                                                               |
|  <b>Manténgase fuera de la luz del sol</b> |                                    |  <b>Fabricante</b> |                    |  <b>0318</b>                                 |  <b>Consúltense las instrucciones de uso en la página web <a href="http://www.deltalabgroup.com/eifus">www.deltalabgroup.com/eifus</a></b> |  <b>QTY</b>                  | Cantidad                                                                                                                      |

En caso de incidente grave\* relacionado con el producto, comunicar tanto a Deltalab, S.L. como a la autoridad competente del Estado en el que se establezca el usuario. \*Se entiende como "incidente grave" aquel que conlleve el fallecimiento o deterioro grave de la salud del paciente o usuario o bien una grave amenaza para la salud pública.



DELALAB, S.L.  
Plaza de La Verneda 1, Pol. Ind. La Llana,  
08191 Rubí, Barcelona. España/Spain.  
[info@deltalabgroup.com](mailto:info@deltalabgroup.com) - [www.deltalabgroup.com](http://www.deltalabgroup.com)

