

ÉCOUVILLONS FLOQUE EN NYLON AVEC SUPPORT EN ABS CASSABLE

Finalité prévue :

Produit stérile invasif par orifice naturel pour le prélèvement et le transport d'échantillons biologiques en vue d'une analyse microbiologique ultérieure par du personnel de santé spécialisé et dans des conditions d'hygiène appropriées. Les écouvillons sont des dispositifs médicaux (MD) et sont couverts par le CE0318. Produit à usage unique. La méthode de stérilisation est indiquée sur l'emballage primaire.

Présentation :

Le prélèvement est composé d'un support cassable en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) et d'une tête en nylon floqué dont la forme est adaptée au prélèvement de samples nasopharyngés. Les prélèvements peuvent être conditionnés individuellement dans un tube ou dans un emballage peel-pack ou flow-pack. Le prélèvement est destiné à être utilisé en milieu hospitalier.

Précautions :

L'utilisation de la brosse ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs auxquels elle est destinée.

Ne convient à aucune autre utilisation que celle pour laquelle il est prévu. Ne pas utiliser si l'emballage présente des signes de rupture ou de détérioration. Si l'emballage de l'unité a perdu son intégrité, ne pas utiliser le tampon car sa stérilité ne peut être garantie. Ne pas utiliser si le tampon est sale. Jetez le coton-tige s'il est cassé ou s'il manque la tête. La réutilisation du produit peut provoquer une infection. Manipulez-le avec précaution. Bien que cela soit peu probable, une pression trop forte pourrait casser le coton-tige. En cas de casse, jetez-le immédiatement. Les cotons-tiges ne nécessitent pas de conditions de stockage particulières. Une fois utilisés, les cotons-tiges doivent être décontaminés ou traités comme des déchets hospitaliers contaminés. Il incombe à chaque laboratoire de manipuler, traiter et éliminer les déchets conformément à la législation en vigueur. Les écouvillons non utilisés peuvent être considérés comme des produits non dangereux et peuvent être éliminés selon ce critère. Ne pas utiliser si la date de péremption est dépassée. Ne pas utiliser si un composant manque ou si les informations imprimées sur le produit ne sont pas correctement affichées.

REF.	DESCRIPTION
310217	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW

Glossaire des symboles:

 Référence du catalogue	 Référence du lot	 Date limite d'utilisation	 Stérile par irradiation	 Système de barrière stérile unique
 Identifiant unique de l'appareil	 Dispositif médical	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Usage unique	 Date de fabrication
 Tenir à l'écart de la lumière du soleil	 Fabricant	 Marquage CE 0318	 Consulter les instructions d'utilisation sur le site web www.deltalabgroup.com/eifus	 Quantité

En cas d'incident grave* lié au produit, merci de le communiquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l'autorité compétente de l'État dans lequel l'utilisateur est établi. *Par "incident grave", on entend ce qui entraîne la mort ou une dégradation grave de la santé du patient ou de l'utilisateur ou bien alors une menace importante pour la santé publique.