

TAMPONE IN NYLON FLOCCHATO CON SUPPORTO IN ABS FRANGIBILE

Destinazione d'uso:

Prodotto sterile invasivo per orifizio naturale per la raccolta e il trasporto di campioni biologici per la successiva analisi microbiologica da parte di personale sanitario specializzato e in condizioni igieniche adeguate. Il tampone è un dispositivo medico (MD) e rientra nella normativa CE0318. Prodotto monouso. Il metodo di sterilizzazione è indicato sulla confezione primaria.

Presentazione:

Il tampone è composto da un supporto frangibile in acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) e da una testina in nylon floccato con una forma adeguata al prelievo di campioni nasofaringei. I tamponi possono essere confezionati singolarmente in un tubetto o in una confezione peel-pack o flow-pack. Il tampone è destinato all'uso in ambiente ospedaliero.

Precauzioni:

L'uso dello tampone non presenta alcuna difficoltà per gli utenti previsti.

Non adatto ad alcun altro uso diverso da quello previsto. Non deve essere utilizzato se la confezione presenta segni di rottura o deterioramento. Se si osserva che la confezione singola ha perso la sua integrità, non utilizzare lo tampone poiché non è garantita la sterilità. Non deve essere utilizzato se si osserva sporcizia sullo tampone. Gettare lo tampone se è rotto o privo della testina. Il riutilizzo del prodotto può causare infezioni. Maneggiare con cura. Anche se improbabile, esercitare una pressione eccessiva potrebbe rompere il tampone. In caso di rottura, smaltirlo immediatamente. I tamponi non richiedono condizioni speciali di manutenzione. Una volta utilizzati, i tamponi devono essere decontaminati o trattati come rifiuti ospedalieri contaminati. È responsabilità di ciascun laboratorio maneggiare, trattare e smaltire i rifiuti in conformità con la legislazione vigente. I tamponi non utilizzati possono essere considerati prodotti non pericolosi e possono essere smaltiti secondo questo criterio. Non utilizzare se la data di scadenza è stata superata. Non utilizzare in caso di mancanza di qualche componente o se le informazioni stampate sul prodotto non sono visibili correttamente.

REF.	DESCRIPTION
310217	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW

Glossario dei simboli:

 Numero di catalogo	 Codice lotto	 Data di scadenza	 Sterile per irraggiamento	 Esclusivo sistema di barriera sterile
 Identificatore univoco del dispositivo	 Prodotto sanitario	 Non utilizzare se il contenitore è danneggiato	 Non riutilizzare	 Data di produzione
 Mantenere al riparo dalla luce del sole	 Produttore	 Marcatura CE	 Fare riferimento alle istruzioni d'uso sul sito web www.deltalabgroup.com/eifus	 Quantità

In caso di incidente grave* relativo al prodotto, avvisare sia Deltalab, S.L. nonché l'autorità competente dello Stato in cui è stabilito l'utente. *Per "incidente grave" si intende quello che comporta un decesso o un grave peggioramento della salute del paziente o dell'utilizzatore o una grave minaccia per la salute pubblica.