

ZARAGATOA FLOCULADA DE NYLON COM SUPORTE DE ABS QUEBRÁVEL**Finalidade prevista:**

Produto estéril invasivo por orifício natural para recolha e transporte de amostras biológicas para posterior análise microbiológica por pessoal de saúde especializado e em condições higiénicas adequadas. Os zaragatoas são produtos sanitários (MD) e estão abrangidos pela CE0318. Produto de uso único. O método de esterilização está indicado na embalagem primária.

Apresentação:

O zaragatoa é composto por um suporte quebrável de acrílonitrilo butadieno estireno (ABS) e uma cabeça de nylon flocado com uma forma adequada para a recolha de amostras nasofaríngeas. Os zaragatoas podem ser apresentados embalados individualmente dentro de um tubo ou de uma embalagem peel-pack ou flow-pack. O zaragatoa destina-se a ser utilizado em ambientes hospitalares.

Precauções:

A utilização do zaragatoa não apresenta qualquer dificuldade para os utilizadores previstos.

Não é adequado para qualquer outra aplicação que não seja a sua utilização prevista. Não deve ser utilizado se houver sinais de ruptura ou deterioração da embalagem. Se se verificar que a embalagem unitária perdeu a sua integridade, não utilize o escovilhão, uma vez que não há garantia de esterilidade. Não deve ser utilizado se se verificar sujidade no escovilhão. Deite fora o zaragatoa se estiver partido ou sem cabeça. A reutilização do produto pode causar infeções. Manuseie com cuidado. Embora seja improvável, exercer uma pressão demasiado forte pode partir o zaragatoa. Em caso de quebra, deite fora imediatamente. Os zaragatoas não requerem condições especiais de manutenção. Os esfregões, uma vez utilizados, devem ser descontaminados ou tratados como resíduos hospitalares contaminados. É da responsabilidade de cada laboratório manipular, tratar e eliminar os resíduos de acordo com a legislação em vigor. Os zaragatoas não utilizados podem ser considerados produtos não perigosos e podem ser eliminados de acordo com este critério. Não utilizar se a data de validade tiver expirado. Não utilizar se faltar algum componente ou se as informações impressas no produto não estiverem visíveis corretamente.

REF.	DESCRIPTION
310217	FLOCKED SWAB NASOPH. BP 80MM FLOW

Glossário de símbolos:

 REF	Número de catálogo	 LOT	Código de lote	 Prazo de validade	 STERILE R	Estéril por radiação	 Sistema exclusivo de barreira estéril
 UDI	Identificador de dispositivo exclusivo	 MD	Produto Sanitário	 Não utilizar se a embalagem estiver danificada	 Não reutilizar	 Data de fabricação	
 Mantenha-o fora da luz do sol		 Fabricante	 CE 0318	 Marcação CE	 Consulte-se as instruções de uso na página web www.deltalabgroup.com/eifus	 QTY	Quantidade

No caso de um incidente grave* relacionado com o produto, notifique a Deltalab, S.L. bem como a autoridade competente do Estado em que o usuário está estabelecido. *Entende-se por "incidente grave" aquele que acarreta a morte ou grave deterioração da saúde do doente ou usuário ou uma grave ameaça à saúde pública.